



### Forholdsregler for brug




R-net styresystemet er designet med fokus på brugerens sikkerhed. Det indeholder mange sofistikerede selv-test funktioner, som søger efter potentielle problemer med en hastighed på 100 gange pr sekund. Hvis kontrolsystemet finder et problem enten i dets eget kredsløb eller i kørestolens elektriske system kan det ske at kørestolen stopper, afhængig af hvor alvorlig problemet er. R-net er designet til at maksimere brugerens sikkerhed under alle normale forhold. På trods af dets kompleksitet kan R-net ikke tage hensyn til omstændigheder, som stiller kørestolen eller betjeningsboksen udenfor dens specificerede driftsbetingelser og derfor er det vigtigt, at brugeren er opmærksom på nedenstående forholdsregler:

- 1) Kør ikke med kørestolen :
  - a) uden at overholde de restriktioner, som fremgår af kørestolens brugermanual, f.eks. maksimum stigning, kanthøjde etc.
  - b) på steder og overflader, hvor tab af vejgreb kan blive farlig, f.eks. på våde eller græsklædte skrånninger.
  - c) hvis betjeningsboksen eller andre afgørende komponenter er defekte. Hvis kørestolen bevæger sig på en uventet måde så SLIP JOYSTICKET og tryk på tænd/sluk knappen. Dette vil fjerne drevet og strømmen til de elektromagnetiske bremses.
- 2) Selvom R-net styresystemet er designet og produceret til at være ekstrem pålideligt og alle enheder er gennemtestet, vil der altid være en risiko for (uanset at sandsynligheden herfor er meget lille), at der kan være en systemfejl. I visse tilfælde af systemfejl skal joysticket (af sikkerhedsmæssige årsager) stoppe stolen øjeblikkeligt. Hvis de fysiske svækkelser hos brugeren er sådan, at en pludselig opbremsning vil kunne resultere i et fald fra stolen, er det nødvendigt, at der installeres en sikkerhedssele eller anden fastholdende enhed på stolen. Den fastholdende enhed skal bruges hver gang, kørestolen er i bevægelse.

For kontaklinformationer se venligst [www.ROLTEC.com](http://www.ROLTEC.com)

### R-NET JOYSTICK MODUL BRUGERINFORMATION

ROLTEC el-kørestole A/S ønsker dig tillykke med din nye kørestol, og takker dig for den tillid, du har vist os ved netop at vælge vores produkt.

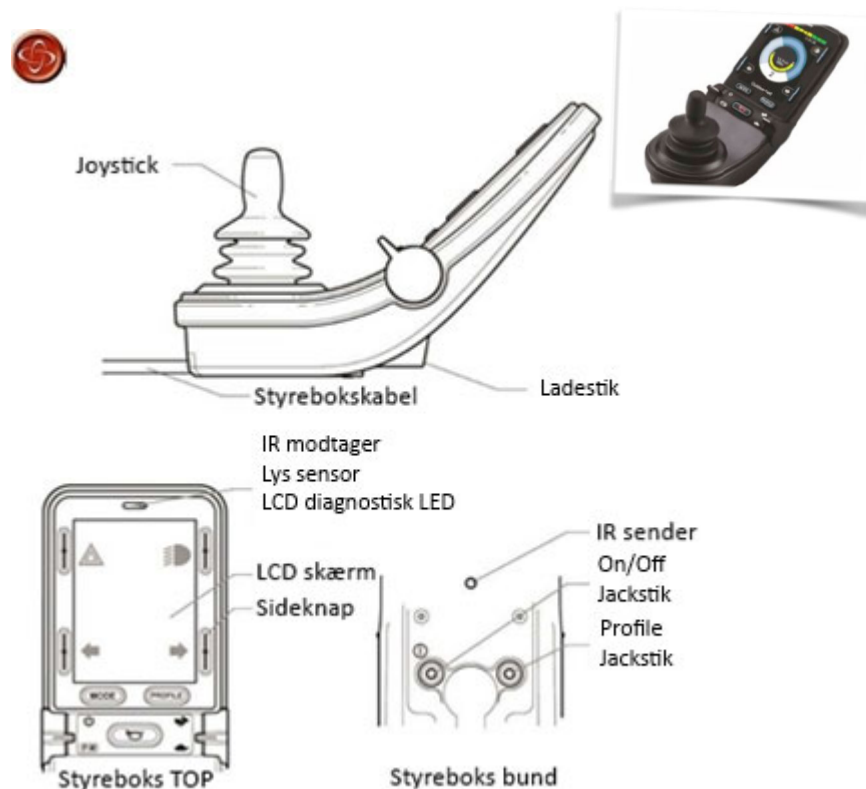

Den konkrete udformning af dette styresystem kan variere afhængigt af specifikationen og type af kørestol, du arbejder med. Se kørestolens brugermanual for nøjagtige oplysninger om det system, du arbejder med.

**Denne guide fritager ikke for at læse brugermanualen.**

**CONTROL PANEL**


**IR Modtager:** Tillader systemet at replicere almindeligt anvendte IR-enheder, såsom fjernbetjeninger til TV og DVD.

**Lys sensor:** Registrerer omgivende lys til automatisk at justere skærmens lysstyrke  
**LCD Diagnostisk LED:** Denne LED blinker for at indikere et problem med LCD-skærmen.



**Tænd/sluk:** Ved at bevæge denne knap fremad slås R-Net til og fra. Brug ikke knappen til at stoppe kørestolen – undtagen i nødstilfælde.

**P-M:** Ved at bevæge denne knap bagud får brugeren mulighed for at navigere gennem tilgængelige profiler og tilstande i systemet.




**Horn:** Denne knap aktiverer advarselssignal med lyd.



**Mode:** Gør det muligt for brugeren at navigere i gennem de forskellige el-funktioner. De tilgængelige funktioner er afhængige af programmering og det ekstra udstyr, som er forbundet til styringen




**Profile:** Gør det muligt for brugeren at navigere mellem køre-profilerne. Antallet af tilgængelige profiler er afhængig af, hvordan kontrolsystemet er programmeret.

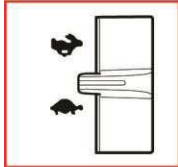
**Hastighed:**

Ved at bevæge knappen fremad øges kørehastigheden.

Ved at bevæge knappen bagud mindskes kørehastigheden.

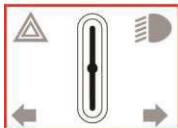

**Lys:** Disse knapper styrer kørestolens lysfunktioner.

Funktionen for hver knap er illustreret med et ikon, der vises på LCD-skærmen ved siden af knappen. Når funktionen er aktiveret, vil ikonet lyse eller blinke.



**Ekstern On/Off Kontakt:** Dette giver brugeren mulighed for at tænde og slukke for styresystemet ved hjælp af en ekstern enhed, såsom en 0/1 kontakt.



**Ekstern Profile Kontakt:** Dette giver brugeren mulighed for at vælge profiler ved hjælp af en ekstern enhed, såsom en 0/1 kontakt.



Joystick modulet leveres med en gummi prop, som skal sættes i stikket, når der ikke er tilsluttet en ekstern enhed.

**JOYSTICK**

Joysticket styrer hastighed og retningen af kørestolen. Skub joysticket i den retning, du ønsker at køre. Jo længere, du skubber det, jo hurtigere hastighed. Når joysticket slippes, stopper kørestolen, og bremserne slås automatisk til.

**LADERSTIK**

Tilslut kun den medfølgende lader til kørestolen i dette stik.

**LCD DISPLAY**

Status for styresystemet ses ved at observere LCD-skærmen. Styresystemet er tændt, når skærmen er baggrundsbelyst.

**PLEJE**

- Undgå at dit styresystem får slag, især joysticket. Sørg for at styresystemet er godt beskyttet, når kørestolen transporteres.
- Styresystemets levetid forlænges, hvis udsættelse for ekstreme forhold holdes på et minimum. Rengør altid dit styresystem, hvis det har været i berøring med mad og drikke.
- Brug en fugtig klud og opvaskemiddel blandet med vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

**DAGLIG KONTROL**

Joystick: Med styresystemet slukket skal du kontrollere, at joysticket ikke er bøjet eller beskadiget, og at det vender tilbage til midten, når du slipper det. Hvis der er problemer, må kørestolen ikke bruges. Kontakt din forhandler.

**UGENTLIG KONTROL**

Elektriske bremser: Denne test udføres på et plant gulv med mindst én meter frirum omkring kørestolen: Tænd styresystemet.

Kontroller, at efter 1 sekund forbliver batterimåleren tændt eller blinker langsomt.

Skub joysticket langsomt fremad, indtil du hører, at de elektriske bremser fungerer.

Stolen kan begynde at bevæge sig.

Slip straks joysticket. Du skal kunne høre hver elektriske bremse fungere inden for få sekunder.

Gentag testen 3 gange ved at skubbe joysticket bagud, til venstre og til højre.

Hvis kørestolen er udstyret med lys, blinklys eller sædetilpasningsaktuator, kontrolleres ligeledes, at de fungerer.

Stik: Kontroller at alle stik er sikre, korrekt samlet og fri for skader.

Kabler: Kontroller kablerne for skader.

Manchet: Kontroller den tynde gummi manchete omkring bunden af joysticket for skader. Kontroller kun visuelt – undgå at røre ved manchetten.

Montering: Sørg for at Joysticket er sikkert fastgjort til kørestolen. Overskrue ikke skrue.